



AQUASOL Femina

Bacterial Vaginosis

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ (ΒΚ)

Η Βακτηριακή κολπίτιδα (ΒΚ) είναι μία από τις πιο κοινές κολπικές μολύνσεις που εμφανίζουν οι γυναίκες κάθε ηλικίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους, και η πάθηση μπορεί να είναι δυσάρεστη για την καθημερινότητά τους. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κνησμό στην περιοχή του κόλπου, δυσσομία, εκκρίσεις και δυσφορία.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis είναι μια αναζωογονητική γέλη, χρήσιμη στην αντιμετώπιση προβλημάτων Βακτηριακής Κολπίτιδας. Δημιουργεί ένα είδος μανδύα πάνω στον κολπικό βλεννογόνο, και αυτός ο φραγμός προσκολλάται δημιουργώντας ένα προστατευτικό στρώμα. Λειτουργεί περιορίζοντας την προσκόλληση βλαβερών βακτηρίων και μικροοργανισμών στον βλεννογόνο, δημιουργώντας δυσμενές περιβάλλον για αυτά.

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis υποστηρίζει το φυσιολογικό σύστημα αποκατάστασης του ιστού και βελτιστοποιεί την κατάσταση του βλεννογόνου, σταθεροποιώντας το καλύτερο δυνατό pH για την οξύτητα του κόλπου.

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis αποκαθιστά την ισορροπία της φυσιολογικής κολπικής χλωρίδας, και χρησιμεύει στην αντιμετώπιση της Βακτηριακής Κολπίτιδας (ΒΚ) με τις ανεπιθύμητες εκκρίσεις ή/και τη δυσσομία, όπως και στην πρόληψη των ανεπιθύμητων εκκρίσεων, δυσσομίας, και άλλων συναφών προβλημάτων.

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis διατηρεί τον κόλπο σας ενυδατωμένο. Ανακουφίζει από ενοχλήσεις όπως εκκρίσεις, δυσσομία, κνησμός και ερεθισμοί.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis

- Όταν έχετε ενοχλήσεις όπως δυσσομία, ερεθισμούς και εκκρίσεις.
- Όταν έχετε ευαισθησία σε μολύνσεις Βακτηριακής Κολπίτιδας.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis εφαρμόζεται στον κόλπο και την περιβάλλουσα περικολπική περιοχή για ανακούφιση από τα συμπτώματα Βακτηριακής κολπίτιδας.

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis μπορεί να εφαρμοστεί και μέσα στον κόλπο με τη χρήση των παρεχόμενων απλικατέρ.

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis είναι συμβατό με τη χρήση προφυλακτικών από λάτεξ.

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στην περίπτωση ενοχλήσεων της εξωτερικής ευαίσθητης περιοχής, μπορείτε να εφαρμόσετε AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis με το δάχτυλό σας (πάντα να προσέχετε να πλένετε τα χέρια σας καλά πριν και μετά την εφαρμογή).

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis έχει ειδικά απλικατέρ, που βιδώνουν στο σωληνάριο. Αυτά τα ειδικά απλικατέρ σας επιτρέπουν να εφαρμόσετε το προϊόν μέσα στον κόλπο.

Τα απλικατέρ είναι μίας χρήσης, δεν προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση. Πάντα να πλένετε τα χέρια σας καλά πριν και μετά την εφαρμογή.

1. Αφαιρέστε το καπάκι από το σωληνάριο. Πριν από την πρώτη χρήση, τρυπήστε το σωληνάριο με το άκρο του καπακιού.
2. Βιδώστε το απλικατέρ στο άνοιγμα του σωληναρίου.
3. Τραβήξτε το έμβολο για να γεμίσετε το απλικατέρ, πιέζοντας ταυτόχρονα το σωληνάριο, έως ότου σταματήσει το έμβολο (μία δόση).
4. Ξεβιδώστε το απλικατέρ από το σωληνάριο και βρείτε μια άνετη θέση ώστε να εισάγετε το απλικατέρ μέσα στον κόλπο. Πιέστε απαλά το έμβολο και αδειάστε όλη τη δόση του προϊόντος μέσα στον κόλπο (μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε μια λεπτή στρώση της γέλης στην άκρη του απλικατέρ για να διευκολυνθεί η εισαγωγή στον κόλπο).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για την αντιμετώπιση Βακτηριακής Κολπίτιδας, εφαρμόστε AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis μία φορά ημερησίως για τουλάχιστον 5 ημέρες, κατά προτίμηση πριν από τον ύπνο.

Για την αποτροπή συμπτωμάτων όπως οι εκκρίσεις και η δυσσομία, εφαρμόστε μία φορά κάθε 3 ημέρες πριν τον ύπνο.

Για την ανακούφιση από τον ερεθισμό, την ερυθρότητα και τον πόνο, εφαρμόστε τη γέλη όπως και όταν απαιτείται.

ΣΥΣΤΑΣΗ:

Aqua, Glycerin, Propanediol, Ppg-26-buteth-26, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Betaine, Inulin, Hydroxyethylcellulose, Xanthangum, Benzylalcohol, Phenoxyethanol, Panthenol, Potassium Sorbate, Lacticacid, Alpha-glucan Oligosaccharide, Sodium Hyaluronate, Disodiummedta, Parfum, Allantoin, Rhamnose, Glucose, Glucuronicacid, Tocopherol.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες, που να προκύπτουν από τη χρήση του AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis. Ωστόσο, να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά. Εάν έχετε αμφιβολίες, εφαρμόστε μικρή ποσότητα της γέλης στο εσωτερικό μέρος του αντιβραχίονα. Εάν εμφανιστούν κόκκινα σημάδια, συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ενημερώστε τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για οποιοσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες ή εάν επιμένουν τα συμπτώματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis προορίζεται για ατομική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άλλα άτομα. Μακριά από τα παιδιά. Μην καταπίνετε το προϊόν. Αποθηκεύετε σε ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο φως και σε θερμοκρασία δωματίου (μεταξύ 5° και 30°C). Να μη χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί φθορές. Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που εμφανίζεται στη συσκευασία.

Μην χρησιμοποιείτε ξανά το απλικατέρ, προορίζεται για μία μόνο χρήση. Κλείνετε το καπάκι μετά από κάθε εφαρμογή.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ

Μετά την εφαρμογή ενδέχεται να νιώσετε ένα αίσθημα μυρμηκίασης και/ή καψίματος, το οποίο είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί γρήγορα.

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχώς για περισσότερες από 30 διαδοχικές ημέρες.

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis δεν είναι μικροβιοκτόνο ή φάρμακο.

Σε περίπτωση επίμονων ή επαναλαμβανόμενων ενοχλήσεων, πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με το γιατρό σας.

Το προϊόν δεν έχει αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση.

Το προϊόν δεν είναι σπερματοκτόνο και δεν παρέχει προστασία έναντι της εγκυμοσύνης.

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis διατηρεί τη βέλτιστη κολπική οξύτητα και το σπέρμα είναι αλκαλικό, οπότε η χρήση του προϊόντος ενδέχεται να μειώσει την δραστηριότητα του σπέρματος. Συνεπώς, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν υπάρχει επιθυμία εγκυμοσύνης.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες που να προκύπτουν από την ταυτόχρονη εφαρμογή και χορήγηση κολπικών ενυδατικών κρεμών και οιστρογόνων, είτε από το στόμα ή τοπικά εφαρμοζόμενα. Στην περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών, συμβουλευτείτε το φαρμακοποιό ή το γιατρό σας.



AQUASOL
Femina
Bacterial Vaginosis

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σωληνάριο 30ml με 5 απλικατέρ μίας χρήσης. **CE**



Biokosmes s.r.l.– socio unico
Via dei Livelli 1, 23842 Bosisio Parini (LC) ΙΤΑΛΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

Galenica A.E.
Ελευθερίας 4, 14564, Κηφισιά,
Τ. 210 5281700
www.aquasolfemina.gr

..... Σύμβολα που προβάλλονται



Σήμανση CE που χορηγείται από τον Κοινοποιημένο Φορέα 0477



Κατασκευαστής



Αποθηκεύετε μεταξύ 5° και 30°C



Δείτε τις οδηγίες για τη χρήση πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν



Ημερομηνία λήξης



Αριθμός παρτίδας